

Test uden papholder

Fremgangsmåde:

1. Testkassetten pakkes ud først og ligger frem på bordet.
2. Pakken til podepinden pakkes op, således at podepinden stikker lidt ud, og er klar til at man kan tage den med en hånd.
3. Prøverøret tages frem, og der tilsættes, eller man får tilsat, buffervæsken i prøverøret. (hvis man har et forfyldt testrør behøves påfyldning ikke) Hætten sættes ikke på. Den forbliver på bordet.
4. Mens den påfyldte/eller forfyldte prøverør holdes med en hånd, tager den anden hånd tager podepinden ud (den stikker ud af pakken og er klar). Herefter bruger man en hånd til at sætte podepinden op i begge næsebor skiftevis.
5. Herefter sætter man podepinden i buffervæsken, klemmer og rotere som anvist, og sætter derefter podepinden fra sig. Med den nu ledige hånd tager man hætten/dyssen, sætter den på røret, og drypper buffervæsken på den allerede udpakket kassette i den anbefalede antal dråber.
6. Svaret afventes